



**ЖИВАС ООД**

CE 0120



бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

## **ЖИВАХЕКС СПРЕЙ MD**



**ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ**

### **СЪСТАВ:**

#### **Активни вещества :**

Хлорхексидин диглюконат 0.5g /100ml

Изопропанол 60g /100 ml

#### **Други съставки:**

Парфюмна композиция

Оцветител

Деминерализирана вода

### **ВИД НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ:**

Бистра бледозелена течност с приятен аромат

pH – 5.0 – 7.0

Активните му съставки са биоразградими.

Препаратът не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е съвместим с различните материали. Притежава почти нулев алергичен потенциал.

**След изтичане на дезинфекционното време обработените инструменти могат да се използват без последващо измиване с вода.**

### **СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:**

ЖИВАХЕКС спрей MD притежава мощно бактерицидно, фунгицидно и вирусцидно (HIV, H1N1, Herpes simplex, Parotitis virus, Parainfluenz virus) действие.

### **ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Бърза дезинфекция на медицински и стоматологичен инструментариум, медицинска апаратура и оборудване.

### **НАЧИН НА УПОТРЕБА:**

Обект на дезинфекция	Работен разтвор	Начин на употреба	Експозиция
Медицински инструменти	Готов разтвор	Напръскване с пулверизатора до омокряне	5 минути



**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни и напитки, при температура от 0 - 35° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО  
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:**

Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния лист за безопасност

**ОПАКОВКА:** Флакони от 1000 ml ,700 ml и 200 ml със спрей помпа.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** 3 години от датата на производство